


Para obtener más información sobre los productos, partes y servicios de Ortiz, visite www.ortiz.biz en Internet.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO



**PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**

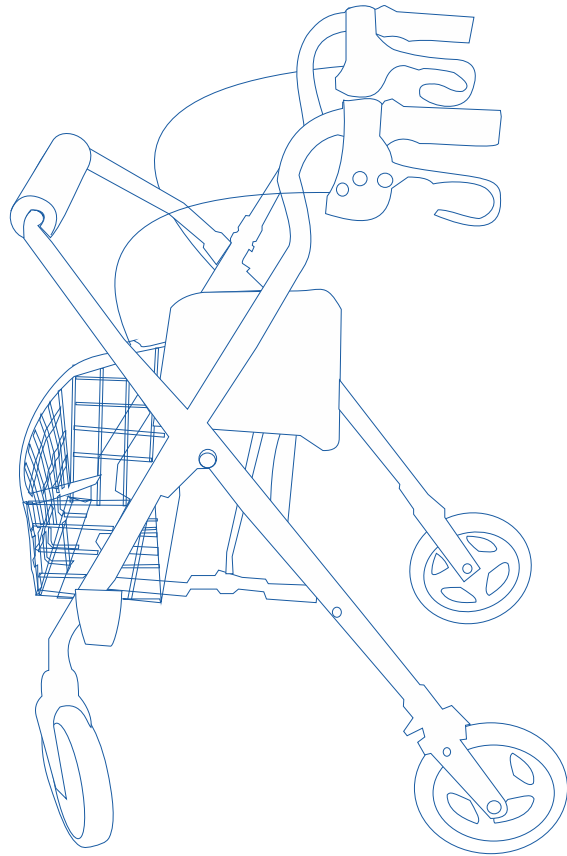

Manual de Usuario

Andadera con Asiento y 4 Ruedas Mod. LK7022

GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año en chasis a partir de la fecha de compra. Las partes de uso o desgaste (Llantas, gomas de frenos, etc.) requieren reemplazo de las piezas acorde al mismo desgaste. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la poliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz

Servicio a Clientes: 3777-4000

Manual de Usuario

Una Guía para ayudarlo en la operación, mantenimiento y uso seguro de su ANDADERA CON ASIENTO Y CUATRO RUEDAS

REGLAS DE SEGURIDAD BÁSICAS

Es importante que el usuario de la andadera rodante aprenda completamente los métodos seguros para realizar las actividades diarias.

Es importante también que las personas que la auxilien estén familiarizadas con los procedimientos de asistencia apropiados. Consulte a su médico, enfermera o terapeuta para que determine los métodos mas accesibles de acuerdo a sus habilidades.

La andadera rodante no califica de acuerdo a los estándares federales como asientos de automóviles y no deberan de ser utilizadas como asientos de vehículos de motor.

USO DE SEGUROS PARA RUEDAS. Asegure las ruedas traseras accionando las palancas de los seguros hacia arriba, verificando que las mismas están debidamente bloqueadas, antes de sentarse o levantarse de la andadera rodante. Las Rodajas delanteras deberán estar posicionadas hacia delante antes de hacer algún movimiento.

ESTABILIDAD DELANTERA. No se mueva hacia delante en el asiento mientras aprende a salirse de la andadera rodante. Si es necesario hacerlo, asegurese de que las rodajas delanteras están posicionadas hacia delante. Si algún objeto es levantado del suelo, pase sobre este y después regrese, así las rodajas girarán hacia la posición adecuada. Esto proporciona a la andadera una mayor estabilidad.

ESTABILIDAD LATERAL. Nunca trate de alcanzar algún objeto que esta mas alla de la longitud de su brazo. Nunca se incline hacia fuera de la andadera, pues podría ocasionar que esta se volcará.

CUANDO SE TRANSPORTA. Trabe el freno ANTES de usar el asiento. Cuando use la andadera rodante en forma ambulatoria, el asiento debe estar en la posición de ABAJO. Para obtener una estabilidad óptima, el asiento debe estar en la posición de abajo cuando se use el rodador a fin de brindar ayuda ambulatoria. Trabe el freno de mano cuando use la andadera rodante en la posición estacionaria.

RAMPA. Conozca su propia capacidad y limitación en términos de fuerza y resistencia antes de aventurarse en un rampa. Usted y la persona que le atiende deberán consultar a un profesional calificado para conocer las técnicas correctas para manejar en una rampa.

Cuatro reglas básicas de seguridad que deberán ser consideradas antes de aventurarse en una rampa:

1. Superficie de la rampa ¿Es muy lisa?
2. Grado de inclinación ¿Esta muy inclinado para intentarlo yo solo?
3. Largo de la rampa ¿Esta muy larga la rampa para resistir el desplazamiento a traves de esta?

El cuidado apropiado y el mantenimiento son indispensables a efecto de que su andadera rodante se mantenga siempre en buenas condiciones. Asegurese de que su andadera rodante esté lubricada todo el tiempo. Un representante calificado o un centro de servicio especializado y autorizado, deberá ser consultado para revisiones periódicas (recomendable cada seis meses) y cuando las reparaciones sean necesarias.

CAIDADOS GENERALES. Limpie el esmaltado frecuentemente, por lo menos una vez a la semana, utilizando un lienzo suave y limpio. Seque la silla inmediatamente si esta expuesta a la humedad. Pula el metal una vez al mes con una cera para autos o limpiador apropiado para el esmalte.

TAPICERIA. Limpie la tapiceria con un solución de jabón suave y limpie con un lienzo seco. Si su tapiceria esta desgastada o rota, principalmente en su refuerzo interior, ésta deberá ser remplazada rápidamente, ya que ésta podría no soportar su peso.

RUEDAS. Limpie las ruedas con agua tibia y detergente suave. Séquelas con un paño limpio. Lubríquelas periódicamente con aceite 3-in-1® o si comienzan a chirriar. Y será necesario reemplazarlas si presentan cuarteaduras por el desgaste natural del material y exposición a la luz solar, cuando presenten un desgaste considerable en su superficie.

USO DE LOS FRENOS DE MANO

Tire hacia ARRIBA la parte superior de las manijas del freno hacia las agarraderas manuales. Realice uno (1) de los pasos siguientes: PERMANEZCA ESTACIONARIO – mantenga la manija del freno ARRIBA, CONTINÚE MOVIÉNDOSE – suelte la manija del freno.

GUIA DE OPERACIÓN GENERAL

Su distribuidor de andaderas rodantes puede hacerle ajustes a su silla y proveerlo con información operacional.

PARA PLEGAR Y DESPLEGAR LA ANDADERA RODANTE

APERTURA. Esta andadera cuenta con un sistema plegadizo que permite abrir la estructura mediante unos puntales laterales empujando hacia abajo, enseguida desplaza hacia abajo el asiento hasta que este en posición horizontal. La andadera rodante permanecerá en la posición ABIERTA.

PLEGADO. Tome y levante de la parte posterior el asiento para subirlo hasta que adquiera una posición vertical. Jale hacia arriba para que se plieguen los puntales laterales. Repita el mismo procedimiento con el otro puntal lateral. La andadera rodante permanecerá en la posición CERRADA.

BRAZOS DESMONTABLES. El brazo se desengancha presionando el seguro, colocado en el tubo frontal del mismo.

BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE. Para ajustar la altura, afloje el seguro, coloque el brazo a la altura requerida, luego vuelva el seguro a su posición.

