



**PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



Cama de Hospital

Instrucciones

GUÍA DE USO

A fin de que su Cama le de muchos años de servicio satisfactorio, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Para Limpiar su cama, utilice un paño suave y semihúmedo

Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.

PARA ARMAR SU CAMA

Su cama es muy fácil de armar, únicamente necesita colocar el tambor en el piso y la cabecera y la piecera en los extremos que les corresponden. Levante el tambor con ayuda de otra persona y haga que los pernos del tambor caigan en los ganchos de la cabecera y piecera. Tenga cuidado con sus manos al colocar y enganchar el tambor.

GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México

C.P. 45010 Teléfono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002

RFC: HGI9711269IA E-mail: contacto@ortiz.biz

www.ortiz.biz