

Fronda para tracción Cervical




Paso1. Levante la fronda sosteniendo con una mano los anillos de metal "D" para hacer que la fronda cuelgue como se muestra en la ilustración.

Paso2. Coloque la cabeza en el centro, colocando el mentón en el soporte frontal del mentón y las correas exteriores colgando de la parte trasera de la cabeza.

Paso3. Fije las correas "C" al velcro del soporte del mentón.

Paso4. Ajuste la fronda moviendo la correa "E" hacia arriba o abajo a través de los anillos "D".

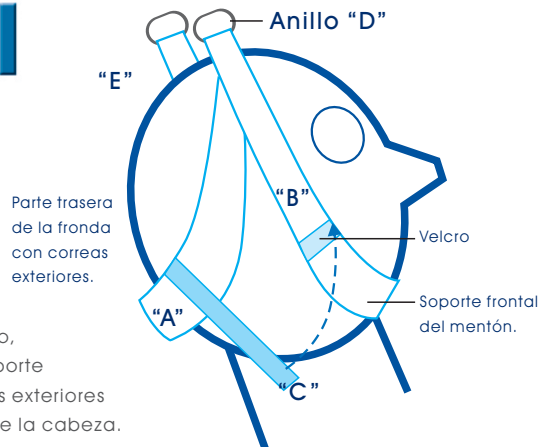

Importado por: Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 7233 Cd. Granja Zapopan, Jal. C.p. 45010
Tel:3627-0504 Fax:36278-0835 R.F.C. HGI9711269IA
www.ortizhealthgroup.com e-mail:ventas@ortizhealthgroup.com
Made in Taiwan Contenido: 1Pza.