

## INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.- Antes de medir la presión arterial, el paciente debe de estar totalmente relajado y descansado.
- 2.- El paciente debe de estar sentado o acostado con el brazo estirado permitiendo que le sea enrollada la cubierta de tela y esta quede bien ajustada, para que de esta forma las arterias del brazo nos permitan detectar la presión sanguínea y el pulso cardiaco como si se tratara del mismo corazón.
- 3.- La envoltura del Esfigmomanómetro deber de enrollarse aproximadamente 2cms. arriba del codo, se recomienda utilizar el brazo izquierdo, después de tener bien enrollado y ajustado el brazal (cubierta de tela), cheque que el manómetro este en posición vertical si la aguja permanece en los límites cero (0).
- 4.-Comience a presionar la perilla hasta que el índice de la aguja se encuentre entre los números 180/200mmG. Comience aflojar la válvula gradualmente (2 a 3 mm HG es Recomendado) de la perilla y cheque con la ayuda del estetoscopio la presión sanguínea. Una buena presión sanguínea oscila aproximadamente 110-130 Alta 70-90 Baja. Dependiendo de las características del paciente, como su edad, estado físico, etc..

## COMPONENTES :

- A) Manometro mod. 2005 Marca América
- B) Perrilla con Válvula
- C) Cámara de 2 Tubos Latex
- D) Brazal(cubierta de tela).
- F) Estuche.

Código: 2001  
Descrip.: Esfigmomanómetro aneroide américa  
Importador: Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Domicilio.: Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010

Conmutador: 01 (33) 3777-4000

Ventas: 01 (33) 3777-4001

Fax: 01 (33) 3777-4002

R.F.C.: HGI9711269IA

Aduana: Manzanillo, Colima.

Hecho en China Contenido.: 1 Pza.

[www.ortiz.biz](http://www.ortiz.biz)  
[contacto@ortiz.biz](mailto:contacto@ortiz.biz)



**PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



## Kit Esfigmomanómetro Aneroide América 2001

0-300mmHg

Cont.1 Pza.

Usted ha adquirido un producto Médico de la Marca AMÉRICA Este es un equipo de diagnostico diseñado para medir la presión sanguínea sistólica y diastólica para uso en Hospital u otras clínicas y centros Médicos. El ser un estuche pequeño permite llevarlo consigo a cualquier parte.

**Antes de usar su MANOMETRO cheque siempre que marque cero, de lo contrario puede "sobreinflar" su calibración y dañar el MANOMETRO.  
No desmantele bajo ninguna circunstancia el MANOMETRO ni quite su cubierta.**

## GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.