


INSTRUCTIVO PARA LA BASCULA CLINICA-160

INSTRUCCIONES GENERALES

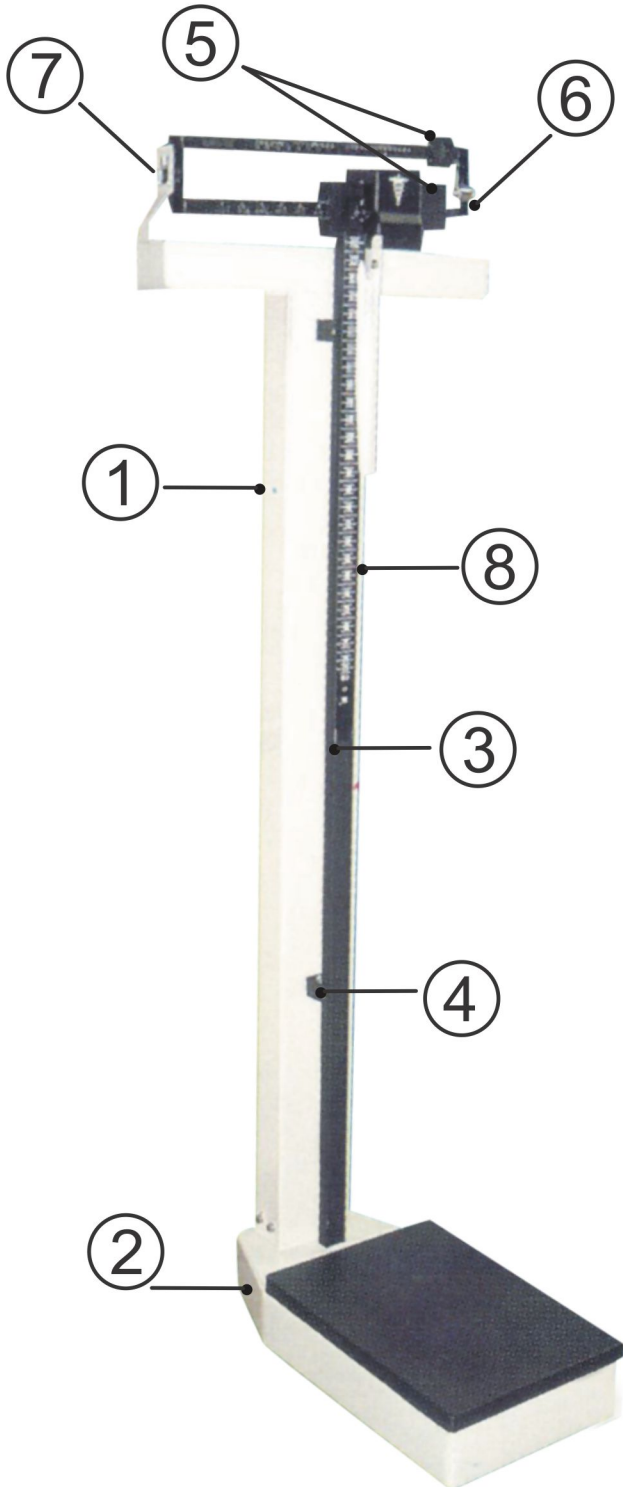

ARMADO

- 1- Coloque el pilar (1) sobre el marco (2).
- 2- Se hacen coincidir los orificios que tiene el pilar (1) con los orificios que tiene el marco en la parte superior (2) y después se roscan los 4 tornillos de $1/4 \times 1/2$ pulgada con llave o dado de $7/16$ de pulgada, respetando el orden de ensamble de las arandelas.
- 3- Cuando esté armada la báscula, coloque el gancho o varilla de tiro (3) en la reacción (4) que se encuentra dentro del marco (2).
- 4- Introduzca los soportes del altímetro (8), en los tornillos que se encuentran roscados hasta la mitad en el pilar (1) y mueva hacia abajo hasta que los soportes se traben los tornillos, enseguida con una llave española de $5/16$ de pulgada apriete los tornillos.
- 5- Revise que las 4 patas de la báscula estén sentadas perfectamente sobre el piso, para que la báscula trabaje con mayor precisión.

USO

- 1- Para empezar a usar la báscula después de que haya nivelado las patas, ponga a fiel la báscula. Esto se logra moviendo los pilones (5) hacia donde las varas indiquen cero y después ajuste la perilla niveladora (6) hacia atrás o hacia adelante, según sea necesario, hasta que la punta de la vara quede en medio del indicador (7).
- 2- La persona que se va a pesar deberá colocarse sobre la plataforma que se encuentra en el marco.
- 3- Deslice los pilones hacia la derecha hasta lograr que la báscula de nueva cuenta se ponga a fiel, al lograr esto se suma la lectura que indica cada pilón, ese es su peso.
- 4- Cada vez que cambie de lugar o de posición la báscula deberá repetir el punto 1 de esta sección, además verifique frecuentemente que la báscula se encuentre a fiel.
- 5- Mantenga limpia la báscula utilizando un trapo suave húmedo con agua.