

GUÍA DE USO

A fin de que su negatoscopio funcione de manera correcta, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Antes de hacer funcionar su negatoscopio, asegúrese de que el tomacorriente se encuentra en buen estado y es compatible con la clavija del negatoscopio.

Procure que el tomacorriente esté instalado cerca del equipo y quede bien accesible.

Evite que el negatoscopio permanezca en ambientes en que haya cambios de temperatura, humedad y polvo bastante notables.

Al limpiar el negatoscopio, utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni tampoco un paño húmedo.

Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.

Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.


En el caso de que no necesitara su negatoscopio por un periodo prolongado de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente.

Para desconectar su negatoscopio, tire de la clavija y nunca el cable, pues podría causar un desperfecto.

Si su negatoscopio llegara a fallar u operar anormalmente, desconéctelo y dirijase con su distribuidor.

PARA CAMBIAR UNA LÁMPARA FUNDIDA

Se recomienda que para cambiar una lámpara fundida, lleve su negatoscopio con algun técnico electricista. Si ud. deseara cambiar la lámpara, Desconecte el negatoscopio, necesitará quitar los remaches de la parte frontal superior (puede hacerlo con una broca de taladro). Después necesitará quitar el acrílico frontal y así poder quitar el aislante de las terminales de las lámparas. Después coloque la nueva lámpara, igual a la que quito en un principio, (mismo tamaño, mismo voltaje) conéctela de la misma manera que estaba colocada, ponga aislante en las terminales, vuelva a colocar el acrílico, coloque la pieza metálica y vuelva a remachar.

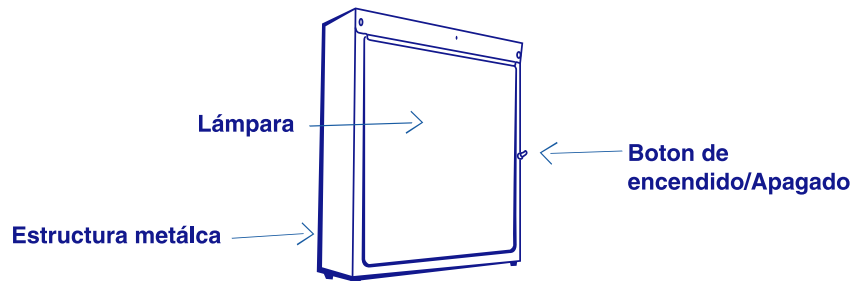

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México

C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002

RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz



**PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



Negatoscopio Manual de Usuario

GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Las partes de uso o desgaste (Lámparas, interruptor, etc.) requieren reemplazo de las piezas acorde al mismo desgaste. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Servicio a Clientes: 3777-4000