



**PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



## **Instructivo Carreola PCI 954**

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
R.F.C: HGI9711269IA e- mail: [contacto@ortiz.biz](mailto:contacto@ortiz.biz)



**1**

La carreaola se compone en sí de 2 partes,  
1.-asiento  
2.- Base con ruedas



**2**

Despliegue la base



**3**

Ajuste  
la presión  
con los  
tornillos  
laterales



**4**

Embone las perillas laterales,  
de ser posible al mismo tiempo.



**5**



Para sujetar al frente  
debajo del asiento  
encaje la orquilla y  
gire la perilla  
para presionarla.