

TOLDO OPCIONAL

*INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLE DE TOLDO

COLOCACIÓN DE TOLDO



El toldo está listo para montarse. Se sujeta mediante unos tornillos y unas tuercas tipo mariposa



Posteriormente se fijan los soportes tubulares a la estructura de la carreola introduciendolo en el orificio indicado.

*Estas Instrucciones son solo de utilidad si usted a adquirido el toldo.



PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION



Instructivo de Uso

CARREOLA PARA P.C.I. MOD. 954

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002
R.F.C: HGI9711269IA e- mail: contacto@ortiz.biz



1

La carreola se compone en sí de 2 partes,
1.- asiento
2.- Base con ruedas



2

Despliegue la base



3

Ajuste
la presión
con los
tornillos
laterales



4

Embone las perillas laterales,
de ser posible al mismo tiempo.



5



Para sujetar al frente
debajo del asiento
encaje la orquilla y
gire la perilla
para presionarla.