

GUÍA DE USO

A fin de que su Timón funcione de manera correcta, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Coloque e instale el timón de manera que quede fijamente adherido a la pared. Utilice taquetes y pijas adecuadas para soportar el peso del timón.


A las partes de madera, aplíqueles aceite especial por lo menos una vez al mes.

Al centro del timón, en donde se encuentra el eje, aplique aceite por lo menos una vez cada quince días o cuando sea necesario.


Al limpiar el timón utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni tampoco un paño húmedo.

Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.

Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.

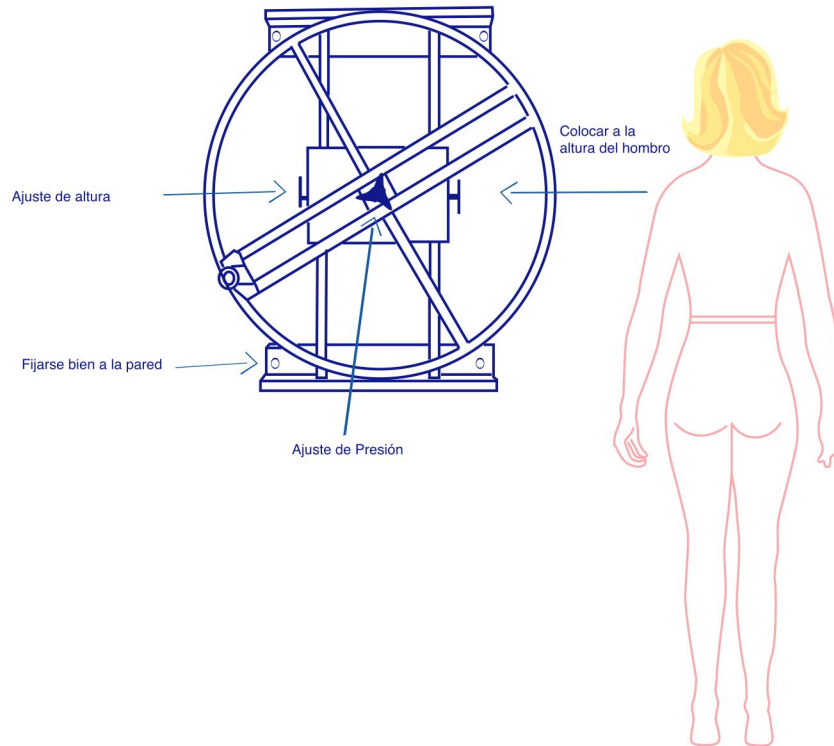

**PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**

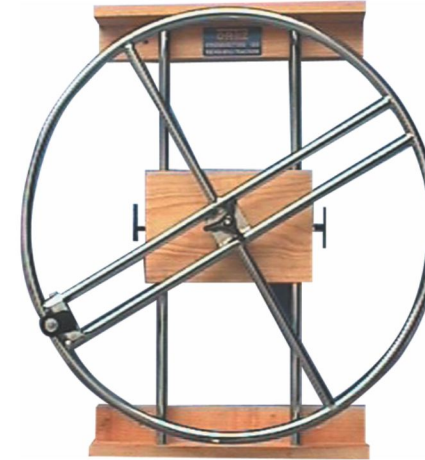

Ovalo o Timon para Hombro Manual de Usuario

GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz

Servicio a Clientes: 3777-4000