

MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida de su sierra cortadora de yeso; debe seguir los siguientes instrucciones:

1. Coloque su sierra cortadora de yeso en un lugar estable y seco.
2. Al limpiarla utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni paño húmedo.
3. Mantener los orificios libres de residuos de yeso, limpiandolos después de cada uso para evitar sobrecalentamiento de la sierra cortadora.
4. Engrasar periódicamente (por lo menos cada 3 meses aproximadamente) los baleros que se encuentran depositados en la parte superior de la sierra.
5. Este producto no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, gotas de lluvia, salpicaduras de agua, zumos, café, vapor, etc. ya que perjudican el funcionamiento del producto.



PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

Manual de Uso y Mantenimiento



SIERRA CORTADORA DE YESO

La sierra cortadora de yeso cuenta con un diseño ergonómico y permite el fácil manejo de la misma.




La forma correcta de sujetar la Sierra Cortadora es como se indica en la ilustración,



Mantener los orificios de ventilación descubiertos, esto, para prolongar la vida de su sierra cortadora.

Encender la sierra cortadora y Apagarla cuando deje de usarlo

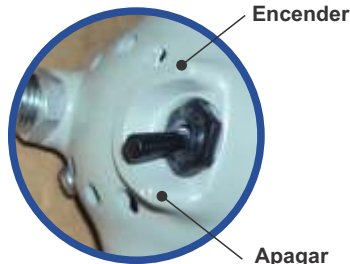

La hoja de corte solo funciona de forma oscilatoria, no de forma rotatoria.



PRECAUCIÓN

A fin de que su sierra cortadora de yeso funcione de manera correcta, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

- * Este equipo es una Herramienta de uso médico
- * **No** se deberá usar para otro fin
- * Este equipo **NO** esta diseñado para uso **Continuo**, su **uso correcto es Intermitente**
- * **Usar** el equipo un máximo de **25 minutos**, y deje **descansar** un mínimo de **5 minutos** entre corte y corte antes de volver a utilizar, el exceso en su uso continuo podrá causar sobrecalentamiento que puede dañar permanentemente el producto y causar daños al usuario.
- * Antes de conectar sierra cortadora de yeso, asegurese de que **el contacto y de que el enchufe y el voltaje son compatibles (110 V)**.
- * **No** manipular nunca los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión y derivación.
- * **No** se debe conectar ni usar la sierra cortadora de yeso con las manos mojadas o húmedas.
- * **Si la sierra cortadora de yeso da corriente**, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado, si la operación de desconexión resulta ser peligrosa, **conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión de la sierra cortadora de yeso.**

ESTE EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA CORTAR VENDAJES DE YESO O ESCAYOLA.

Cualquier intento por cortar otro tipo de materiales como plásticos, metales, madera, etc. podrá dañar las hojas de corte, sobrecalentará el equipo pudiendo causar daños permanentes a la sierra y causar daños al usuario.

EL USO INCORRECTO PERDERÁ TODA GARANTÍA.

NOTA IMPORTANTE:

Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.